

РЭМО



РЕЦИРКУЛЯТОР
СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3

**ОЧИСТИТЕЛЬ (ОБЛУЧАТЕЛЬ) ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ОВУ-03**

ТУ 26.60.13-002-13760586-2020


КШУР.676211.004РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.4. В случае выхода из строя УФ-лампы или продолжительности работы 8000 часов, её замену должен осуществлять только квалифицированный специалист. Самостоятельную замену лампы осуществлять не рекомендуется.

7.5. Для замены УФ-лампы следует отключить очиститель от бытовой сети, отвернуть винты на боковых поверхностях крышки корпуса. Затем заменить лампу и установить крышку корпуса на место.

7.6. В случае возникновения иных неисправностей следует отправить очиститель воздуха на завод-изготовитель для проведения гарантийного или пост-гарантийного ремонтов.

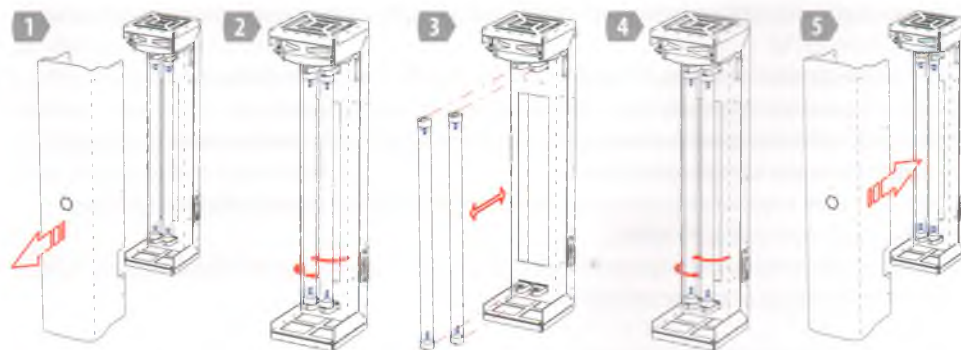

Замена бактерицидных УФ-ламп.

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА ОВУ-03.

8.1. Таблица 2

Категория помещения	Бактерицидная эффективность, %	Объём помещения, м ³			
		до 30	до 50	до 70	до 100
I	99.90	—	—	—	—
II	99.00	1 час	2 часа	—	—
III	95.00	40 минут	1 час	2 часа	3 часа
IV	90.00	30 минут	50 минут	2 часа	8 часа
V	85.00	30 минут	40 минут	1 час	2 часа

8.2. Значения рассчитаны для *St aureus* и лампы, установленной на заводе-изготовителе.

8.3. При объемах помещений выше указанных в таблице или необходимости сокращения времени эффективной работы, следует увеличивать количество очистителей воздуха. Например, для обеспечения требуемой бактерицидной эффективности 90,00% для помещения объемом до 70м³ и сокращении времени эффективной работы до 1 часа, следует установить два прибора ОВУ-03.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Лампа, установленная в изделии содержит ртуть. В связи с этим изделие должно быть утилизировано в соответствии с местными (муниципальными, региональными) правилами утилизации опасных отходов.